

zoetis

BENGATEST

ANTIGEN COLORAT ROZ-BENGAL, ACIDIFIAT ȘI TAMPONAT
PENTRU DIAGNOSTICUL SEROLOGIC AL BRUCELOZEI
PRIN REACȚIA DE AGLUTINARE RAPIDĂ PE LAMĂ

COMPOZIȚIE

Suspensie concentrată de *Brucella abortus* (tulpina Weybridge 99), inactivată prin căldură și fenol (0,5%), dispersată în tampon acid și colorată cu Roz Bengal.

INDICAȚII

Diagnosticul serologic al brucelezei (determinată de *Brucella melitensis*, *abortus* și *suis*) prin reacția de aglutinare rapidă pe lamă.

MOD DE UTILIZARE

Materiale

- Pipetă automată cu vârfuri de unică utilizare capabile să distribuie volume de 25-30 μ l.
- Picurător calibrat la 30 μ l pentru a ajuta la distribuirea antigenului (un picurător calibrat este inclus în pachetul produsului BENGATEST). **ATENȚIE:** Dacă utilizați un volum de probă diferit decât 30 μ l, vă recomandăm să utilizați o pipetă automată.

Reagenții

Serul/serurile de testat și antigenul trebuie depozitate la +2°C - +8°C și se aduc la temperatura camerei cu 30 - 60 de minute înainte de utilizare.

Martori de control

Includeți un ser pozitiv și un ser negativ într-o serie de sero-aglutinare ca martori de control pentru activitatea antigenului.

Procedură

Este esențial să fie utilizate două volume egale, din serul de testat și antigen pentru a se efectua testul.

- Plasați o picătură de 25-30 μ l din fiecare ser de testat pe placă.
- Agitați ușor flaconul de antigen și puneți un volum egal lângă fiecare din seturi. Puteți utiliza un picurător calibrat inclus în pachetul produsului BENGATEST pentru a distribui 30 μ l. Recomandăm urmărirea ghidului privind Bunele Practici de Laborator la utilizarea picurătorului calibrat.
- Cu grijă, amestecați antigenul cu serul.
- Agitați ușor la temperatura camerei și citiți rezultatele după 4 minute.

Rezultate


- Lipsa aglutinării: absența anticorpilor.
- Aglutinare, chiar și foarte puțin: prezența anticorpilor.

Depozitare

A se păstra la temperaturi între +2°C și +8°C, protejat de lumină. A nu se congela.

NUMAI PENTRU UTILIZARE IN VITRO.

Textul pe o cutie cu 1 flacon de 10 ml + 1 picurător calibrat la 0,03 ml

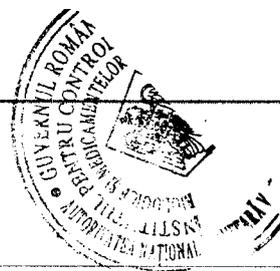

zoetis

BENGATEST

330 reacții

Flacon de 10 ml + 1 picurător
calibrat la 0,03 ml

**ANTIGEN COLORAT ROZ-BENGAL,
ACIDIFIAT ȘI TAMPONAT PENTRU
DIAGNOSTICUL SEROLOGIC AL BRUCELOZEI
PRIN REACȚIA DE AGLUTINARE RAPIDĂ PE LAMĂ**

A se păstra la temperaturi între +2°C și +8°C, protejat de lumină. A nu se congela.

zoetis

BENGATEST

330 reacții

Flacon de 10 ml + 1 picurător
calibrat la 0,03 ml

Suspensie concentrată de *Brucella abortus* (tulpina Weybridge 99), inactivată prin căldură și fenol (0,5%), dispersată în tampon acid și colorată cu Roz Bengal.

Agitați înainte de utilizare.


Citiți "Instrucțiunile de utilizare" cu atenție.

NUMAI PENTRU UTILIZARE IN VITRO.

Lot:

Exp:

Zoetis France – Gerland Plaza – 23 rue Pierre Gilles de Gennes – 69007 LYON – FRANȚA

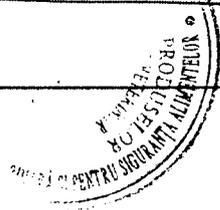

Bengatest 100 ml vial label

zoetis

BENGATEST (ABGC)

FLACON DE 100 ml / 100 ml VIAL

Consultez la notice.
Conserver entre +2°C et +8°C et à l'obscurité.
Ne pas congeler.

Read "Instructions for use".
Store between +2°C and +8°C, protected from light.
Do not freeze.

USAGE IN VITRO / IN VITRO USE

Exp: 00/00/00
Lot: 00BG1000

Bengatest 10 ml vial label

zoetis

BENGATEST

FLACON DE 10 ml ^{U.S.A.}

Consultez la notice.
Conserver entre +2°C et +8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

USAGE IN VITRO ³

214109

zoetis

BENGATEST

FLACON DE 10 ml ^{U.S.A.}

Consultez la notice.
Conserver entre +2°C et +8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

USAGE IN VITRO ³

214109

zoetis

BENGATEST

FLACON DE 10 ml ^{U.S.A.}

Consultez la notice.
Conserver entre +2°C et +8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

USAGE IN VITRO ³

214109

zoetis

BENGATEST

FLACON DE 10 ml

Citiți prospectul înainte de utilizare.
A se păstra la temperaturi între +2°C și +8°C, protejat de lumină. A nu se congela.
NUMAI PENTRU UTILIZARE IN VITRO

Partid

Lot:

zoetis

BENGATEST (ABGTC)

FLACON DE 100 ml

Citiți prospectul înainte de utilizare.
A se păstra la temperaturi între +2°C și +8°C, protejat de lumină. A nu se congela.

NUMAI PENTRU UTILIZARE IN VITRO.

Exp: 00/00/00

Lot: 00BGT000