



**Rose Bengal Brucellosis Antigen**

Pourquier Rose Bengal Ag

Test with confidence\*

**IDEXX**

# Rose Bengal Brucellosis Antigen

Pentru uz veterinar

## Denumire și utilizare

Pourquier\* Rose Bengal Ag este testul IDEXX Rose Bengal pentru detecția serologică a anticorpilor anti bruceloză (*B. melitensis*, *B abortus* și *B suis*) prin aglutinare rapidă.

## Descriere și principii

Pourquier\* Rose Bengal Ag utilizează principiul de aglutinare pe plăci, folosind un antigen colorat cu Rose Bengal într-un mediu tamponat acid (pH 3,65 ± 0,05). Mediul acid evită aglutinările nespecifice. În prezența anticorpilor anti bruceloză din probă, antigenul brucelic va aglutina în probă. Probele care arată prezența aglutinării (chiar ușoară) sunt considerate probe pozitive (prezența anticorpilor anti-bruceloză). Probele care nu prezintă aglutinare sunt considerate probe negative (absența anticorpilor anti-bruceloză). Suspensia de antigen brucelic utilizată în acest kit este o suspensie concentrată de antigen *Brucella Abortus* (tulpina Weybridge 99) inactivată prin căldură și fenol (0,5%), dispersat într-un tampon acid și colorat cu Rose Bengal. Este calibrat pentru a da o reacție pozitivă la o diluție de 1:45 și o reacție negativă la o diluție de 1:55 cu Serul Standard Internațional OIE (OIEISS) sau standardul secundar național, în conformitate cu cerințele OIE.

## Reagenți

### Volum

Reagenți	Volum
1   Rose Bengal Brucellosis Antigen	5 x 10 ml   1x 100 ml

Notă : vezi tabelul de la sfârșitul instrucțiunilor pentru descrierea simbolurilor utilizate pe instrucțiuni și etichetele kitului

## Depozitare

Păstrați reagenții la 2-8°C, protejați de lumină. **Nu congelați.** Reagenții sunt stabili până la data de expirare, cu condiția să fi fost depozitați corespunzător.

## Materiale necesare, dar nefurnizate

- Control pozitiv (disponibil de la IDEXX)
- Control negativ (disponibil de la IDEXX)
- Plăcuțe pentru repartizarea reagenților și probelor
- Micropipete monocanal sau multicanal
- Vârfuri micropipete
- Agitator plăci

## Precauții și avertismente

- Manipulați toate materialele biologice ca potențial infecțioase
- Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție/ochelari de protecție/măști de protecție când manipulați probe și reagenți
- Consultați fișa tehnică de securitate a produsului pentru informații suplimentare
- A se vedea sfârșitul instrucțiunilor pentru avertizări privind precauțiile și avertismentele folosirii reagentului

## Practici de laborator

- Rezultate optime se vor obține urmărind strict acest protocol de lucru. Utilizați vârfuri de pipete separat pentru fiecare probă și control

- Toate deșeurile trebuie să fie decontaminate corespunzător înainte de eliminare. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale, regionale sau naționale
- Trebuie să aveți grijă să preveniți contaminarea componentelor kitului. Nu turnați reagenții neutilizați înapoi în recipiente
- Nu utilizați kitul după data de expirare

### Mod de lucru

Toți reagenții se aduc la temperatura camerei la 18-26°C înainte de utilizare. Reagenții se omogenizează prin agitare sau mixare. Se va scoate din frigider doar cantitatea de antigen suficientă pentru ziua testării.

1. Înregistrați poziția probelor pe foaia de lucru
2. Pipetați 25-30μl din fiecare probă de testat în placă.
3. Agitați ușor flaconul cu Antigen Rose Bengal și distribuiți același volum (25-30μl) lângă fiecare probă
4. Amestecați cu grijă Antigenul Rose Bengal și serul pentru a produce o zonă circulară sau ovală de aproximativ 2 cm diametru
5. Agitați placa ușor exact 4 minute și citiți imediat.

**Notă:** În scopul de a standardiza citirea, este mai bine să se introducă pentru fiecare serie de analiză ca și control pentru Bruceloză, un ser de control pozitiv și o probă de ser negativă cunoscută.

### Rezultate

Verificați dacă rezultatele controalelor sunt în conformitate cu rezultatele așteptate.

### Interpretarea rezultatelor

Verificați dacă rezultatele controalelor sunt în conformitate cu rezultatele așteptate.

- Probele care prezintă aglutinare (chiar ușoară) sunt considerate probe pozitive (prezența anticorpilor anti-Bruceloză)
- Probele care nu prezintă aglutinare sunt considerate probe negative (absența anticorpilor anti-Bruceloză)

### Pentru asistență tehnică:

IDEXX USA Tel.: +1 800 548 9997 sau +1 207 556 4895

IDEXX europe tel.Ş +800 727 43399

Contactați managerul zonal IDEXX sau distribuitorul sau vizitați website-ul nostru: [idexx.com/contactlpd](http://idexx.com/contactlpd)






IDEXX și Test With Confidence sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale IDEXX Laboratories, inc. Sau afiliate în Statele Unite și/sau alte state.


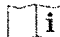



©2019 IDEXX laboratories, Inc. Toate drepturile rezervate.

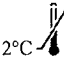

REF P00215	Shake before use Agiter avant utilisation. Agitese antes de usar. Vor Gebrauch sclten. A se agitate inainte de utilizare	<b>IDEXX</b> LOT SN 
Pourquier Rose Bengal Ag 10ml		
For veterinary use only. Rserv a l'usage vtrinaire. Fr Tiere.	IVD	2°C / 8°C ZUL.-Nr.: BFAV-B 368
IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galra, 34090 Montpellier, Franta IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda		
04-55900-00		

REF P00215	Agitați înainte de utilizare	<b>IDEXX</b> LOT SN 
Pourquier Rose Bengal Ag 10ml		
Numai pentru uz veterinar.	IVD	2°C / 8°C ZUL.-Nr.: BFAV-B 368
IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galra, 34090 Montpellier, Franta IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda		
04-55900-00		

REF	P00215	<b>Rose Bengal Brucellosis Antigen</b> (Shake before use) <b>Antigène Brucellique Rose Bengale</b> (Agiter avant utilisation) <b>Antígeno Brucelico Rosa de Bengala</b> (Agitese antes de usar) <b>Rose Bengal Test zum Nachweis von Antikörpern gegen die Brucellose</b> (Vor Gebrauch schütten) <b>Antigeno Rosa Bengala para Brucelose</b> (A se agitate înainte de utilizare)	<b>IDEXX</b> LOT SN 
Pourquier Rose Bengal Ag  5 x 10ml			
For veterinary use only. Réservé a l'usage vétérinaire. Für Tiere.		IVD 	 8°C 2°C ZUL.-Nr.: BFAV-B 368
 IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galéra, 34090 Montpellier, Franta Tel: +33 4 99 23 24 25		 IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda Tel: +800 727 43399	
04-55905-00			

REF	P00215	<b>Antigen Brucelic Rose Bengal</b> (Agitați înainte de utilizare)	<b>IDEXX</b> LOT SN 
Pourquier Rose Bengal Ag  5 x 10ml			
Numai pentru uz veterinar.		IVD 	 8°C 2°C ZUL.-Nr.: BFAV-B 368
 IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galéra, 34090 Montpellier, Franta Tel: +33 4 99 23 24 25		 IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda Tel: +800 727 43399	
04-55905-00			

STAMPED INFORMATION: MONTPELLIER, FRANCE, 010 02, 147K

**Pourquler\*  
Rose Bengal Ag**

Agitati inainte de utilizare

**IDEXX**

**LOT**

10 ml



Pentru uz veterinar

**IVD**



2°C



8°C

Zul.-Nr.: BFAV-B 368

**IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galéra, 34090 Montpellier, FR  
IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, NL  
04-55900-00**

**P00215**

<b>IDEXX P00215</b>	<b>Antigen Rose Bengal</b> (a se agita inainte de utilizare)	<b>IDEXX</b>
<b>Reactiv*</b> <b>Antigen</b> <b>Rose</b> <b>Bengal</b>	<b>IVD</b>	<b>2°C</b>
<b>10 ml</b>	<b>24-M</b>	<b>24-M</b>
<small>           IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, NL            Tel. +31-20-4922222         </small>		

REF P00230	<b>Rose Bengal Brucellosis Antigen</b> (Shake before use) <b>Antigène Brucellique Rose Bengale</b> (Agiter avant utilisation) <b>Antigeno Brucelico Rosa de Bengala</b> (Agitese antes de usar) <b>Rose Bengal Test zum Nachweis von Antikörpern gegen die Brucellose</b> (Vor Gebrauch scülden) <b>Antigeno Rosa Bengala para Brucelose</b> (A se agitate înainte de utilizare)	<b>IDEXX</b>
Pourquier Rose Bengal Ag	IVD	LOT SN
1 x 100ml		
For veterinary use only. Réservé a l'usage vétérinaire. Für Tiere.		ZUL.-Nr.: BFAV-B 368
IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galéra, 34090 Montpellier, Franta Tel: +33 4 99 23 24 25	EC REP	IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda Tel: +800 727 43399
04-55901-00		

REF P00230	<b>Antigen Brucelic Rose Bengal</b> (Agitați înainte de utilizare)	<b>IDEXX</b>
Pourquier Rose Bengal Ag	IVD	LOT SN
1 x 100ml		
Numai pentru uz veterinar.		ZUL.-Nr.: BFAV-B 368
IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galéra, 34090 Montpellier, Franta Tel: +33 4 99 23 24 25	EC REP	IDEXX Europe B.V., P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda Tel: +800 727 43399
04-55901-00		

12